**Dental Thermal Disinfector** 




PG8581

# 設置•施工手順書

### PG8581/PG8591 歯科用洗浄機

- この設置・施工手順書では、人への危害、 財産の損害を防止するため、必ずお守り いただくことを説明しています。
- 設置・施工において、設置・施工手順書に 従わなかったために生じた故障・事故など については責任を負いかねます。

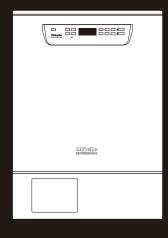

PG8591 ■

ミーレ・ジャパン株式会社

# 1 安全上のご注意

この設置・施工手順書では、次のマークの箇所で人への危害、財産の損害を防止 するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

#### 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害 の程度を区分して、説明しています。

**企警告** 

「死亡や重傷を負うおそれ がある」内容です。

⚠注意

「傷害を負うことや、財産 の損害が発生するおそれ がある」内容です。 お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容 です。

※設置・施工手順書に従わなかったために生じた故障・事故などについては責任を負いかねます。

2 設置上の注意 (所要設備・電源)

- 電源:単独回路で漏電ブレーカー(30mA) を必ず設置してください。
- 給水:推奨水圧200kPa 作動水圧100~1000kPa
- 天板を取りつけたままビルトインする場合、 キャビネットの天板下部から床面まで 855mm以上確保してください。
  - ※ 天板を外す場合は830mm以上確保してください。
- 機器はシンク・キャビネットの近くに設置するように留意してください。
- 歯科用洗浄機は全てポンプによる強制排水方式です。(揚程1m) 排水管は必ず500mm以上立ち上げてください。
- 給水バルブはユーザーが容易に操作できるような向きで取り付けてください。
- 電源、給排水は本体の 左右いずれかに設備します。

0

電源工事や接地工事は電気設備技術基準に準じて行ってください。

- 0
- PG8581,PG8591からは93℃ の熱湯が9.0リットル排水されます。 排水管は耐熱塩ビ管HTを使用してく ださい。
- ※ 耐熱排水管を使用しないと、配管が破損するおそれがあります。(・排水管HT40・HTエルボ・HTチーズ)
- ※ 排水温度低減タンク(排水トラップ)を 必ず使用してください。
- 排水工事はすべて水道法、建築基準法、および各地域の条例、規定に準じて行ってください。
- 設置床面は水平・平坦にし、後で本体を手前にひきだせるようにしておいてください。



電源コードを切断し、直結することは絶対にしないでください。



凍結の恐れがある場所(室温0℃以下)に は設置しないでください。

左右いずれかの 隣接キャビネット内



## PG8581/8591設置の所要設備(電源・給排水管配置)

#### 専用回路の設置 (PG8581 / PG8591)

■漏電ブレーカー(30mA)付三相200V・20A専用回路

60cmタイプ PG8581 / PG8591

三相200V/50Hz/20A 三相200V/60Hz/20A

明工社MR2749と同等品

熱湯が排水されます。排水ホースと

#### 給排水管の配置 (PG8581 / PG8591)

#### 給水管を2本使用する場合(標準)

● 給水管×2 : 1/2"アングル止水栓

(三栄水栓 V620BV-13相当) FL500mm以上立ち上げ


\*

※ ページ1の ⚠ 警告を参照して下さい。

PG8581 / PG8591から93℃の熱湯が 9.0リットル排水されます。

排水管は耐熱塩ビ管HTを使用してください。

★ 右記の設備例は代表的な方法です。現場に 応じて給・排水管、コンセントの位置は変えて ください。(各ホースの長さは1.75mです。)

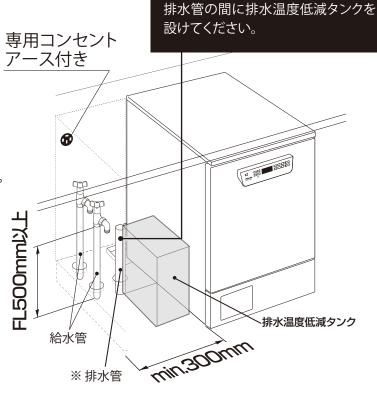

### 同梱部材リスト(PG8581 / PG8591)


設置・施工前に部品の確認をしてください。

部名名	0	2	3	4	5	6	7	8	9	0
名 ・ 姿 図 ・										
個 数	ホースバンド	ストレーナー (セット)	カウンター 保護板	カウンター 保護シート	取扱説明書 保証書	ドアオープナー	Y字分岐管	ホース アダプター	1/2" エルボ	排水ホース
PG8591 PG8581	$O_{\times 2}$	$O_{\times 2}$	0	$O_{\times 2}$	0	$O_{\times_2}$	0	$O_{\times_2}$	$O_{\times_2}$	0



# 4

### PG8591/8581の設置場所

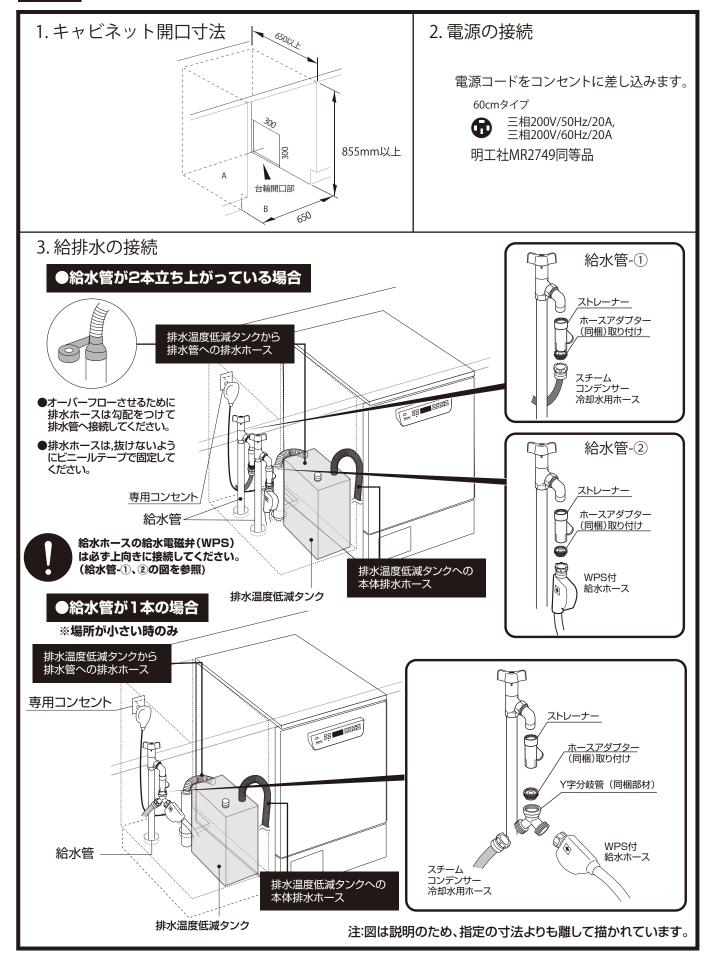


DentW-PG8591-220128

### ミーレジェットウォッシャー推奨取り付け例 PG8581・PG8591

注意 : 蒸気・熱風が出ますので換気扇が必須です。

### PG8581 / PG8591

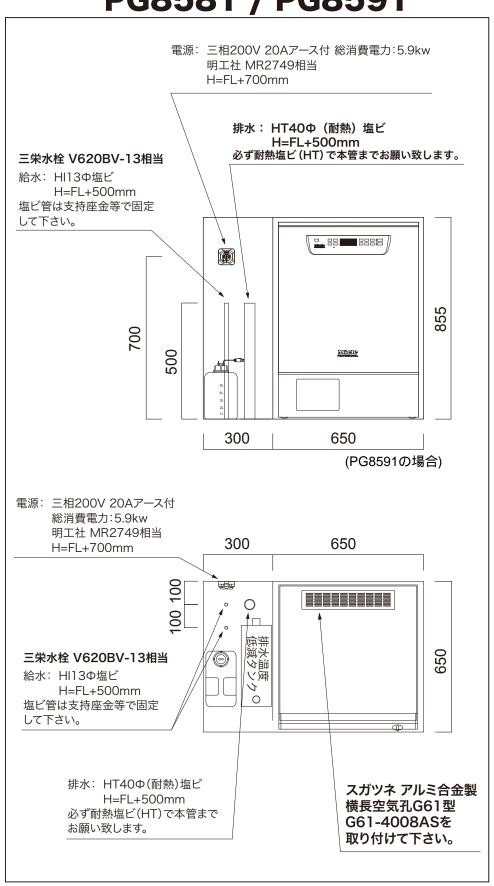





設置後、かならず試運転を行ってください。水漏れや異常音、本体の傾きがないこと、正常に排水することをご確認ください。

#### ミーレ・ジャパン株式会社

〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12オリックス目黒ビル4階 電話(03)5740-0030 FAX(03)5740-0035 お問い合わせは



#### 白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord4208LD1F ☎ (011)616-5814 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目34番2号 ☎ (048)884-3951 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロスタ12F ☎ (03)5217-4618 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎ (052)733-1877 〒532-0033 大 阪 市 淀 川 区 新 高 1 丁 目 1 番 1 5 号 ☎ (06)6396-4400 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎ (092)432-4618 https://www.hakusui-trading.co.jp/